

Ligasano®

Polyuretanskum för tryckavlastning

Ligasano är ett tryckavlastande och aktivt upprensande förband av polyuretanskum. Förbandet är helt luftgenomsläppligt vilket gör att fukt och värme ej ackumuleras mot huden, detta gör att huden håller en normal temperatur. Ligasano används i förebyggande syfte och vid befintliga trycksår som uppstår när hud eller vävnad utsätts för konstant tryck, samt vid otillräcklig eller utebliven blodcirkulation under längre eller kortare tid. Stoppas cirkulationen tillräckligt länge, dör ett antal celler och blodflödet får allt svårare att återvända. Inom några dagar faller de döda cellerna samman och trycksåret är ett faktum.



1 Hög absorptionsförmåga

2 Tryckavlastande

3 Enkel hantering

Fördelar:

Hög absorptionskapacitet
Många användningsområden
Luftgenomsläpplig
Enkel hantering
Lätt att klippa och forma
Ekonomisk
Kan steriliseras



Egenskaper

LIGASANO som upprensande förband absorberar 15-20 gånger sin egen vikt. Absorptionen sker vertikalt och minskar därmed risken för maceration av den friska vävnaden kring sårets kanter. LIGASANO används främst till vätskande och infekterade sår t.ex. bensår, diabetesfotsår, trycksår och brännskador och även förebyggande mot svampinfektioner. LIGASANO finns även i form av tamponeringsremsa och kan formas som utfyllnad i sårhål och fistlar. Vid tamponering i fistlar ska en hel bit användas och inte flera mindre bitar. Anledningen är att man ska vara säker på att ha avlägsnat allt material när det tas bort.

LIGASANO tryckavlastning ger en jämn tryckfördelning och är helt luftgenomsläpplig. Fukt och värme ackumuleras inte mot huden, vilket bidrar till att normal kroppstemperatur upprätthålls. Ytstrukturen minskar sjuvningseffekten i vävnadsskiktet och minskar friktionen mot huden. Risken för ischemi (otillräcklig blodtillförsel) minskar och därigenom uppkomsten av trycksår. Den gröna klimatplattan används alltid i kombination med den vita plattan. Klimatplattan får aldrig läggas direkt mot huden. Bytesfrekvensen beror på sårets sekretion, förbandet skall dock inte sitta på mer än 3 dagar.

Material

LIGASANO är tillverkad av skummad polyuretan. Den vita plattan har mindre porer än den gröna som har en grövre struktur och högre luftgenomsläpplighet. Produkten ska inte förvaras i direkt solljus eftersom

den då blir gulaktig och spröd. LIGASANO kan steriliseras i autoklav vid 134°C i 4 min. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, CE-märkt enligt CE 1275 alt. CE 0125.

Indikation och applicering

Tryckavlastning i förebyggande syfte samt vid redan uppkomna trycksår. Exempel på användningsområden: mellan fingrar och tår, under bröst, i ljumskar, i händer med kontrakturer, sacrum m.m. Kan även användas vid såromläggningar. Kontraindikationer: Den gröna klimatplattan får inte användas direkt mot huden.

LIGASANO kan klippas och formas för alla upptänkliga konturer. Du hittar många tips i vår "Klippguide". Patientens vikt avgör vilken tjocklek på avlastningen som är lämplig. Rekommenderad tjocklek på tryckavlastning:

Patientvikt	Tjocklek vid sacrum	Tjocklek vid häl
Under 45 kg	2 cm	1 cm
Upp till 75 kg	minst 3 cm	2 cm
Över 75 kg	minst 4 cm	3 cm

För att kontrollera om avlastningen är tillräcklig kan man lägga handen mellan underlaget och LIGASANO och kontrollera så att inga konturer från kroppen känns igenom.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
LIGASANO® kompresser Höggradigt ren, i ask	15 x 15 x 1 cm	8821 444	10 st	9 Afp
	15 x 15 x 2 cm	8821 445	5 st	9 Afp
	24 x 16 x 1 cm	8821 440	10 st	5 Afp
LIGASANO® tamponad	3 m x 5 x 0,3 cm	8821 449	8 st	12 Afp
LIGASANO® tryckavlastning Höggradigt ren, vit	49 x 59 x 1 cm	8821 454	14 st	6 Afp
	49 x 59 x 2 cm	8821 452	7 st	6 Afp
	200 x 50 x 2 cm	8821 461	1 st	6 Afp
	200 x 100 x 1 cm	8821 460	2 st	5 Afp
	200 x 100 x 2 cm	8821 458	4 st	4 Afp
LIGASANO® klimatplatta Höggradigt ren, grön	55 x 45 x 2 cm	8821 462	7 st	4 Afp